

Merkmale

Reinigung von CPAP- und MHSV-Geräten und Zubehör

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Spezielle Hinweise
Maske	<p>Mit nicht-fettendem Spülmittel und weichem Tuch, Schwamm oder unter fließendem Wasser waschen, mit klarem Wasser gut spülen und an der Luft trocknen lassen.</p> <p>Nicht einweichen.</p>	<p>Vor der Reinigung sorgfältig auseinander nehmen, anschließend wie üblich reinigen.</p>		<p>Auf keinen Fall verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desinfektionsmittel • Alkohol • Scheuermittel • Scharfe Haushaltsreiniger • Rückfettende Seifen
Kopfband		<p>Mit nicht-fettendem Spülmittel von Hand waschen, gut ausspülen und aufgehängt an der Luft trocknen lassen.</p> <p>Alternativ können Sie das Kopfband bei 30 Grad in einem Wäschebeutel und mit Feinwaschmittel in der Waschmaschine waschen.</p> <p>Nicht bügeln.</p>		

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Spezielle Hinweise
Schlauch	Bei Verwendung eines Befeuchters: Schlauch von Gerät und Maske trennen und zum Austrocknen aufhängen.	Mit nicht-fettendem Spülmittel waschen, gut durchspülen und aufgehängt an der Luft trocknen lassen.		Achtung beheizbare Schläuche: Elektrische Kontakte dürfen nicht nass werden.
Befeuchterkammer	Am Morgen Wasser entleeren und Befeuchterkammer geöffnet trocknen lassen. In der Schweiz kaltes, trinkbares Leitungswasser verwenden. Optional kann das Wasser für mindestens 10 Minuten abgekocht werden, wodurch der Mineraliengehalt durch Ausfällung verringert wird. Nie kochendes Wasser direkt in den Luftbefeuchter einfüllen.	Befeuchterkammer mit nicht-fettendem Spülmittel auswaschen. Eine Reinigung ist auch im Geschirrspüler möglich: Befeuchterkammer einzeln, d.h. ohne weitere Gegenstände, bei 70 Grad und ohne Spülmittel im Geschirrspüler reinigen.		Entfernen allfälliger Ablagerungen: 1 Teil Essig und 10 Teile Wasser während 10 Minuten einwirken lassen, dann reinigen und mit klarem Wasser nachspülen. VORSICHT: Vor Transport oder Kippen Wasserkammer immer leeren. WICHTIG: Keine Zusätze ins Wasser einfüllen. Destilliertes Wasser für nicht-medizinische Zwecke wird nicht empfohlen, da es Mikropartikel enthält oder mit pathogenen Bakterien kontaminiert sein kann.
Filter			Je nach Gerätetyp waschen oder austauschen.	
Gerät		Gehäuse mit trockenem Tuch abreiben.		

September 2023

LUNGE ZÜRICH

The Circle 62, 8058 Zürich-Flughafen
 T 044 268 20 00, F 044 268 20 20, beratung@lunge-zuerich.ch
 www.lunge-zuerich.ch, Spendenkonto: CH62 0900 0000 8000 1535 7