


Merkmale

Reinigung Kniestück für AirFit F20/ F30-Masken


Ablauf der Reinigung des Kniestücks für AirFit F20/F30-Masken

1.

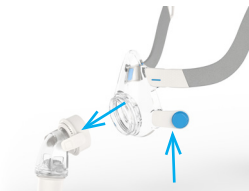


Drücken Sie auf die beiden weissen Knöpfe auf der Seite der Maske und ziehen Sie das Kniestück von der Maske ab.

2.

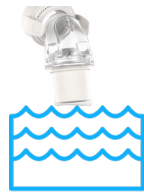

Weichen Sie in einem warmen Wasserbad mit einem milden Flüssigreiniger das Kniestück für etwa 10 Minuten auf.

3.

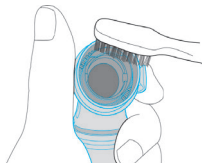

Für mindestens eine Minute sollten Sie das Kniestück im Wasser kräftig schütteln und mit der Hand oder einer weichen Bürste reinigen. Insbesondere die Verbindungsteile, Ventile und Ausatemöffnungen sind wichtig zu reinigen.

4.



Spülen Sie unter fließendem Wasser das Kniestück gründlich ab.

5.



Nun lassen Sie das Kniestück lufttrocknen. Achten Sie darauf, dass es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.

Wenn das Kniestück nicht erkennbar sauber ist, wiederholen Sie die Reinigungsschritte.

Achtung!

Das Kniestück muss immer vollkommen trocken sein, bevor es zum Einsatz kommt.

! Eine tägliche Reinigung des Kniestücks oder nach jedem Einsatz wird empfohlen. Zudem sollten auch das Kissen und der Rahmen täglich gereinigt werden. Das Kopfband können Sie einmal in der Woche reinigen.

! Damit die Qualität Ihrer Maske hoch bleibt und die Ausbreitung von Keimen vorgebeugt wird, ist eine regelmässige Reinigung nötig. Ansonsten könnte Ihre Gesundheit beeinträchtigt werden.

! Wenn das Kniestück Ihrer Maske beschädigt ist, dann setzen Sie sich am besten mit Ihrem Leistungserbringer in Verbindung. Es kann sein, dass das Kniestück ersetzt werden muss.

Weitere Hinweise:

- Tipps beim Schwitzen mit der Maske
- Video Pflege der Maske

